




**HEARING AID
BATTERY**
БАТАРЕЯ ДЛЯ
СЛУХОВОГО
АППАРАТА


0%
MERCURY FREE
НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

Classification: Классификация:	Zinc Air Воздушно-цинковые
Chemical System: Химический состав:	Zn/O₂
Designation: Обозначение:	ZA10, PR70
Nominal voltage: Номинальное напряжение:	1.45V 1.45В
Nominal capacity (standard): Номинальная ёмкость (стандарт):	86mAh (86h, rated at 1mA continuous and 5mA / 100ms Pulses to 1.05 volts. At 20±2°C & 55±10%RH) 86мАч (86ч, при непрерывном токе 1мА и импульсах 5мА / 100мс до 1.05В. При температуре 20±2°C и 55±10%RH)
Nominal capacity (high drain): Номинальная ёмкость (высокий расход):	78mAh (52h, rated at 1.5mA continuous and 5mA / 100ms Pulses to 1.1 volts. At 20±2°C & 55±10%RH) 78мАч (52ч, при непрерывном токе 1.5мА и импульсах 5мА / 100мс до 1.1В. При температуре 20±2°C и 55±10%RH)
Volume: Объём:	0.08 cm³ 0.08 см ³
Weight: Вес:	0.29g 0.29г
Storage Temperature: Температура хранения:	+10°C to +30°C от +10 С° до +30 С°
Operating Temperature: Температура эксплуатации:	0°C to +50°C от 0°С до +50°С
Expiry Period: Срок годности:	3 years 3 года

1. Discharge curves / Кривые разряда

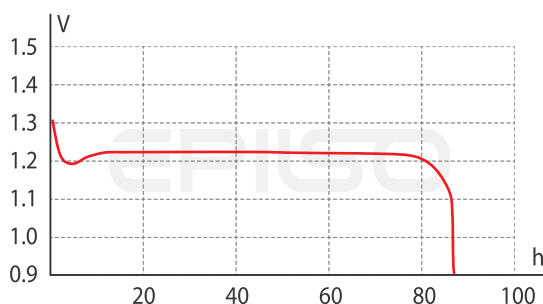


Hearing aid standard /
Стандартный слуховой аппарат

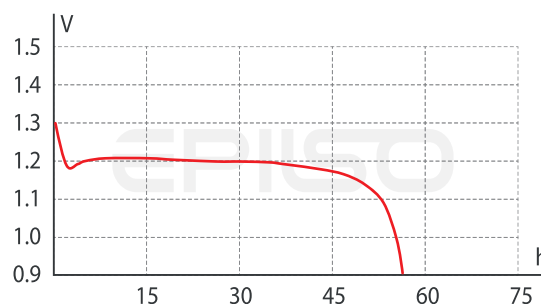

Hearing aid high drain /
Слуховой аппарат с высоким расходом

2. Dimension (mm) / Размеры (мм)

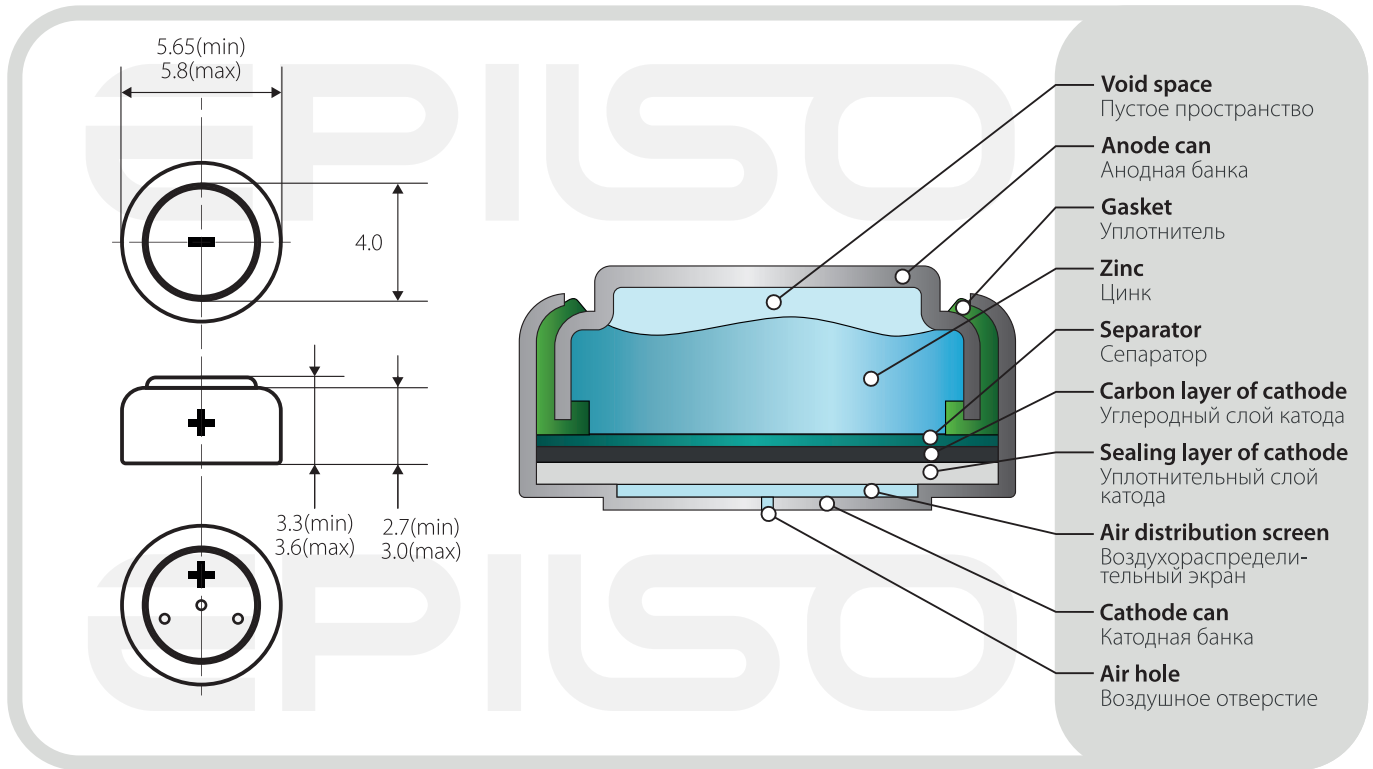

3. Precautions in handling of batteries / Меры предосторожности при обращении с батареями

- Insert batteries correctly with regard to the polarities (+ and -) marked on the battery and the equipment
- Do not short-circuit batteries
- Do not charge batteries and force discharge batteries.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.
- Do not heat batteries.
- Do not weld or solder directly to batteries
- Do not dismantle batteries
- Do not deform batteries
- Do not dispose of batteries in fire
- Keep batteries out of the reach of children
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision
- Do not encapsulate and/or modify batteries
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- Вставляйте батареи правильно, соблюдая полярность (+ и -), обозначенную на батарее и на оборудовании
- Не допускайте короткого замыкания батарей
- Не заряжайте батареи и не разряжайте их принудительно.
- Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов и марок.
- Отработавшие свой ресурс батареи следует немедленно извлечь из оборудования и надлежащим образом утилизировать.
- Не нагревайте батареи.
- Не производите сварку или пайку непосредственно на батареях.
- Не разбирайте батареи
- Не деформируйте батареи
- Не выбрасывайте батареи в огонь.
- Храните батареи в недоступном для детей месте
- Не позволяйте детям заменять батареи без присмотра взрослых
- Не инкапсулируйте и/или не модифицируйте батареи
- Храните неиспользуемые батареи в оригинальной упаковке вдали от металлических предметов. Если батареи уже распакованы, не смешивайте и не перемешивайте батареи.
- Извлекайте батареи из оборудования, если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени, за исключением случаев, когда это необходимо для аварийных целей.

Do not recharge!

Не перезаряжать!